



# Plasma Pen Exklusiv

» Made in Germany «



Augenlidstraffung

und Hautstraffung mit

## Plasmatechnologie!

Wenn Sie eine Lidstraffung ohne OP  
mit der **Plasmatechnologie** wünschen ...

**...dann** haben wir genau das Richtige für Sie! Wir drehen die Zeit zurück und nutzen dazu die innovative Plasmatechnologie. Anti-Aging bedeutet zum einen den Kollagenverlust zu stoppen, Kollagene aufzubauen und zum anderen die überschüssige Haut zu straffen.

- **REDUZIERT Falten**
- **STRAFFT die Haut**
- **STIMULIERT die Kollagenproduktion**

Die innovative Plasmatechnologie (nicht mit Eigenblut Plasma zu verwechseln) nutzt ionisiertes Gas, das aus Ionen und Elektronen besteht. Die Behandlung erfolgt ohne direkten Hautkontakt. Das Plasma entsteht, wenn die Behandlungsspitze ca. 1-2 mm über die Haut gehalten wird. Bei direktem Hautkontakt oder zu großer Entfernung stoppt die Plasma Herstellung. Im Gegensatz zu anderen Technologien wird die Haut nicht geschädigt, sondern stimuliert und angeregt.

## **LASSEN SIE SICH JETZT BERATEN!**

Die Einsatzgebiete sind vielfältig für die effektive Hautstraffung: sowohl kleine Bereiche wie Augenlider (Ober- und Unterlider, Krähenfüße), mittelgroße Bereiche (Hals), als auch große Bereiche (Full Face, Bauchdecke, Oberarme) sind geeignet für die Straffung mit dem Plasma Pen. Der Straffungs- und Liftingeffekt ist direkt nach der Behandlung zu sehen und nach 8 -12 Wochen abgeschlossen.

Die Plasmatechnologie **ohne** OP und Skalpell ist eine sanfte und effiziente Methode die Haut zu straffen (Soft Lifting Methode). Die Behandlungszeit beträgt ca. 30 – 90 Minuten, je nach Größe des zu behandelnden Gebietes. Für ein maximales Ergebnis können 1-3 Behandlungen notwendig sein, je nach Schwere des Erschlaffungsgrades.

## **IHRE INVESTITION - Vorteils-Angebot**

Plasma Pen Exklusiv Made in Germany, Qualitätsprodukt,  
**Wert inkl. Schulung 2900.00 statt 3400.00 CHF (zzgl. MwSt.) inkl. Pflege-Produkte,  
5 Nadelspitzen und Flyer**

## **SCHULUNG**

### **Plasma Pen Basisschulung**

Sie erlernen den grundsätzlichen Umgang mit dem Plasma Pen, seine Wirkungsweise und seine Einsatzmöglichkeiten, sowie die Basistechnik der Behandlung. Sie erfahren den Behandlungsablauf. Im Anschluss an die Schulung sind Sie in der Lage folgende Areale zu behandeln: Oberlid- und Unterlidstraffung, Krähenfüße, Lachfältchen, Stirnfalten, Glabella.

### **Plasma Pen Advance**

Sie haben Routine in der Basistechnik gewonnen, jetzt werden Sie fit für mehr. Aufbauend auf Ihre Erfahrungen erlernen Sie weitere Techniken mit dem Plasma Pen, wie Zugtechnik, Linientechnik und Spraytechnik. Ober- und Unterlippe, Mundwinkel, Ohrfältchen, Nasolabialfalten, Halspartie, Körperpartien, Narbenbehandlung, inaktive Akne, Mini-Facelift, Kombination der Plasmatechnologie mit anderen Techniken.

## **IHRE INVESTITION in Plasma Pen Advance**

**480.00 CHF (zzgl. MwSt.) 1 Tag**

Aus Erfahrung wissen wir, dass Sie nach der Schulung viele Fragen haben werden – wir lassen Sie natürlich nicht alleine.